



Guía de consulta rápida

ACTHAR® GEL
(repository corticotropin injection)
solo para administración subcutánea
80 unidades USP por mL
Inyector precargado unidosis SelfJect™

Antes de la inyección

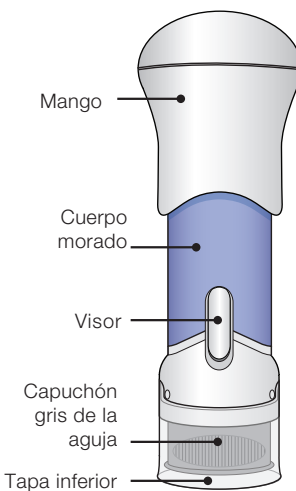

Al finalizar la inyección

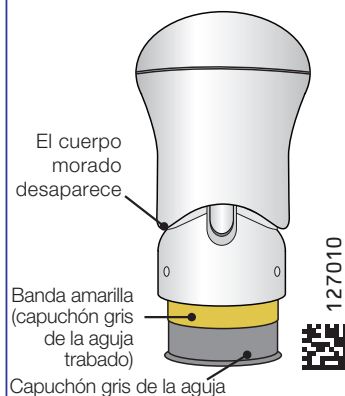

Información importante

- El inyector precargado unidosis SelfJect de Acthar Gel es solo para inyección subcutánea (debajo de la piel).

1. Lea estas instrucciones

- Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene dudas de cómo aplicar la inyección.
- Esto no es un autoinyector. El mango debe bajarse con la mano.
- Esto es un inyector unidosis (solo debe usarse 1 vez).
- La aguja del inyector tiene un capuchón que protege al usuario después del uso.


2. Prepárese para usar el inyector precargado unidosis SelfJect de Acthar Gel

- Retire el inyector del refrigerador y sáquelo de su charola para atemperarlo durante al menos 45 minutos y que quede a temperatura ambiente.
- No use el inyector justo después de haberlo sacado del refrigerador.** El inyector **no** funciona tan bien cuando está frío. **No** lo caliente.
- Revise la fecha de caducidad (EXP) que figura en la caja.
- Aplique esta inyección en un cuarto limpio y bien iluminado.
- Tenga preparada la toallita antiséptica, el apósito adhesivo y un recipiente de objetos punzocortantes.



3. Elija y limpie el lugar de inyección

- Solo para administración subcutánea (debajo de la piel).
- Elija 1 de estos lugares de inyección:**
 - Parte superior del muslo
 - Panza (abdomen), pero a más de 1 pulgada del ombligo
 - Parte posterior del brazo (solo si aplica la inyección otra persona)
- Elija un lugar diferente en cada inyección.
- No aplique la inyección a través de la ropa.**
- No aplique la inyección:**
 - En piel irritada (roja, hinchada o dolorosa)
 - En tatuajes, verrugas, cicatrices o marcas de nacimiento
 - A 1 pulgada o menos de la rodilla o la ingle
 - En estrías

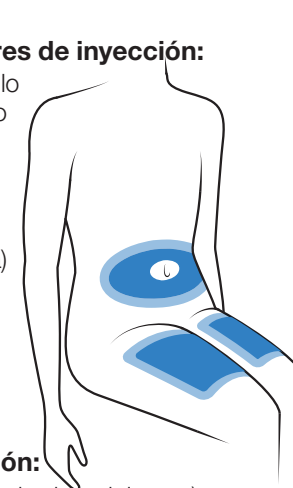


- Lávese bien las manos con agua y jabón.

- Limpie el lugar de inyección con una toallita antiséptica.



4. Inspeccione el inyector y quite la tapa

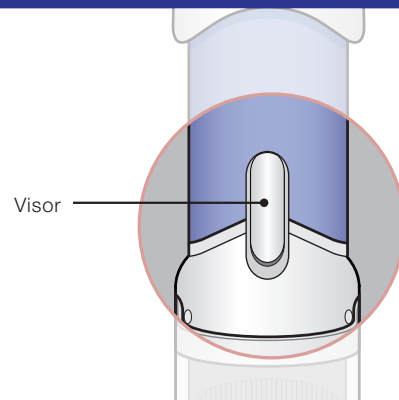


- Inspeccione el medicamento en el visor. El medicamento debe ser una disolución límpida de un color pálido amarillo o anaranjado.
- No use** el medicamento si está turbio o se ven partículas.
- Es normal ver burbujas de aire.



Jale la tapa inferior para quitarla y deséchela.

- No vuelva a ponerle la tapa al** inyector, ya que podría dañarse la aguja.
- Evite tocar el capuchón gris de la aguja.
- Use el inyector de inmediato.

5. Aplique la inyección

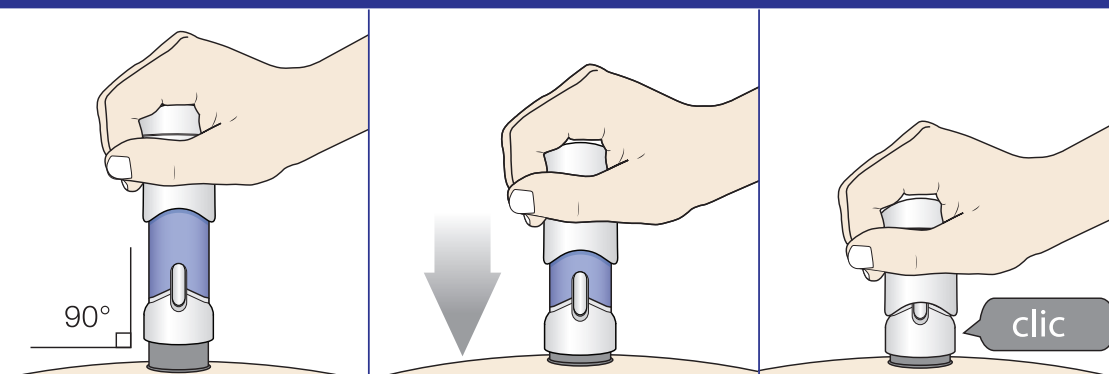

(a) Ponga el inyector directamente sobre la piel limpia, con un ángulo de 90 grados.


No pellizque la piel.

(b) Presione lentamente el mango hacia abajo para inyectar el medicamento.

No levante el inyector durante la inyección. Quizá escuche un "clic" al comenzar la inyección.


(c) La inyección termina cuando el cuerpo morado desaparece y es posible que se escuche un "clic".

6. Levante el inyector y bótelo (deséchelo)

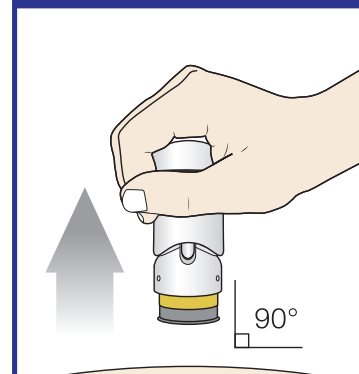

Levante el inyector directamente hacia arriba manteniendo un ángulo de 90 grados con el lugar de inyección.

El capuchón de la aguja está trabado cuando se ve la banda amarilla.

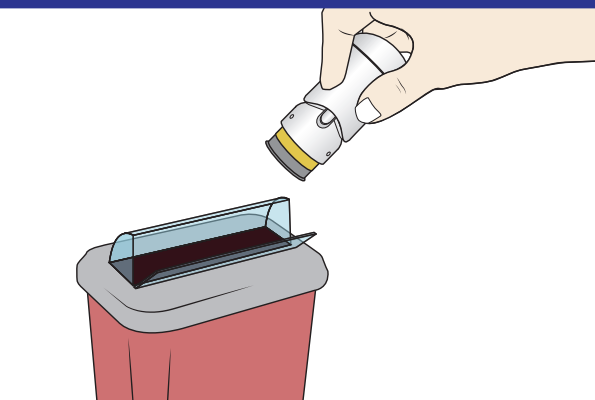

Deposite el inyector en un recipiente aprobado de objetos punzocortantes conforme a la normativa local.

No lo bote (deseche) en la basura doméstica.